

# Портативный комплексный аппарат ультразвуковой терапии и миостимуляции «СТИМ-СОНИК»

## Общие инструкции безопасности:

- Не включать прибор в непосредственной близости к аппаратам с высокочастотным излучением (таким, как микроволновая печь).
- Хранить прибор в сухом месте. Не использовать прибор в ванной комнате.
- Не использовать химические растворители для чистки прибора.
- Проверьте прибор и убедитесь в его целости. Не включать прибор при наличии внешних повреждений.
- Беременным женщинам и кормящим матерям перед применением прибора следует проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не использовать прибор больше 30 мин. в день как при ультразвуковой терапии, так и при комбинированной программе.
- Не пользоваться мобильным телефоном во время процедуры.
- Не использовать прибор в области сонной артерии, особенно лицам с повышенной чувствительностью каротидного синуса.
- Не использовать прибор в области рта и шеи.
- Не стимулировать область сердца. Электроимпульсы могут привести к сердечной аритмии.
- Избегайте использования в области виска, сонной артерии, вблизи металлических имплантатов и устройств для мониторинга дыхания или сердечного ритма.
- Аппарат не должен применяться в областях с отеками, инфекциями, воспалениями, раковой опухолью. Ни в коем случае нельзя помещать электроды на кожную сыпь, раздраженную кожу, воспаленные вены и раны.
- Больные эпилепсией должны проводить процедуры с осторожностью и в присутствии другого человека.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор во время вождения, включения опасного оборудования или во время любой деятельности, при которой существует опасность получения травм.
- Используйте только оригинальные провода и электроды производителя.
- Нельзя проводить процедуры детям младше 5-ти лет.


## Внимание!

**При наличии металлических имплантатов или кардиостимулятора использовать аппарат «Стим-соник» запрещено.**

## Избегайте ультразвукового воздействия на следующие участки тела:

- Глаза
- Внутренние и внешние лимфоузлы
- Матка и живот во время беременности
- Область серьезных травм и ран
- Область кожного воспаления
- Область воспаленных вен или тромба

## Общее описание «Стим-Соник»:

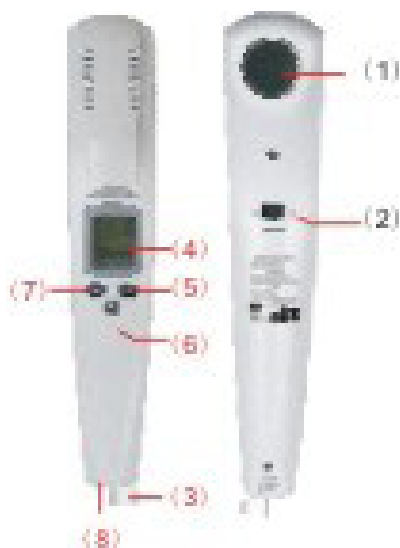

1. Ультразвуковая головка
2. Кнопка включения / выключения
3. Адаптер AC / DC
4. Жидкокристаллический дисплей
5. Кнопка снижения интенсивности
6. Выбор программы / Пауза
7. Кнопка увеличения интенсивности



### Описание структуры дисплея

1. Переключатель программы
2. Пауза
3. Таймер
4. Мощность
5. Индикатор УЗИ

## Руководство по эксплуатации

### Аппарат имеет 3 вида заложенных программ:

- Режим УЗИ (программа U) имеет 6 уровней (1-6) от глубокого воздействия (режим 1) до поверхностного (режим 6).
- Комбинированный режим (программы C1-C7).
- Режим миостимуляции (программы E1-E7).

### Использование соединительного кабеля:

Эксплуатация прибора в режиме УЗИ (программа U) не требует подключения кабеля.

При эксплуатации прибора в комбинированном режиме (программы C1-C7) необходимо подключить кабель с одним выходом для электрода. При этом электрическая цепь замыкается с ультразвуковой головкой.

При эксплуатации прибора в режиме миостимуляции (программы E1-7) необходимо использовать кабель с двумя выходами для двух электродов.

### Кнопки:

on / off включение и выключение

▲ (увеличение интенсивности)

▼ (уменьшение интенсивности)

■ (режим паузы)

## Как использовать «Стим-соник»?

- «Стим-соник» работает от источника питания, батареи не требуется.
- Определите нужную программу, место проведения процедуры.
- Перед началом сеанса нанесите на целевую область проводящий ультразвуковой гель, который обеспечивает эффективность воздействия. Гель необходимо приобретать только у сертифицированного поставщика.
- Включите устройство (зажжется внутренний свет). Таймер начинает мигать, и устройство автоматически начинает отсчет 10-ти минут (только для программ С, U).
- Выберите нужную программу с помощью кнопки M / ■.
- Устройство имеет систему безопасности, которая может идентифицировать режим использования. Только при размещении ультразвуковой головки в нужной области и наличии хорошей проводимости, которую обеспечивает гель, устройство начинает ультразвуковое излучение. (Не рекомендуется использовать воду. Однако, если ультразвуковой гель не доступен, можете заменить гель водой).
- Важно постоянно перемещать ультразвуковую головку медленными круговыми движениями по обрабатываемой области. Обратите внимание, устройство работает без вибрации.
- Через 10 минут, когда сеанс завершен, аппарат перейдет в режим паузы.
- Не рекомендуется проводить сеансы ультразвуковой терапии непрерывно.
- Чтобы увеличить интенсивность излучения, нажмите ▲. Рост амплитуды отображается на дисплее.
- Чтобы уменьшить интенсивность излучения, нажмите ▼.
- Каждое нажатие на кнопку меняет значение амплитуды на 1В. Если максимально разрешенное значение достигнуто, то нажатие на кнопку не будет менять значение амплитуды.
- Диапазон мощности аппарата 0-80 V.

## Изменение подсветки:

- Подсветка LCD становится зеленой при исправной работе аппарата.
- Подсветка LCD становится синей при появлении неисправностей, таких как неправильное подключение электродов или при плохом контакте ультразвуковой головки с телом.
- Подсветка LCD меняется, когда аппарат работает в режимах U и-С.
- Подсветка LCD меняется, когда аппарат работает в режиме С на мощности более 50 V.

## Общие указания по использованию:

Рекомендуется проводить 3 процедуры в день, максимум 21 день.  
Если боль не исчезла полностью, можно повторить курс после недельного перерыва.

## Как правильно определить область для ультразвукового воздействия:

- Найдите иллюстрацию для типа вашей боли (в буклете на английском языке).
- Болевые области могут, но не обязаны, совпадать с областью проведения процедур.
- Область боли (красный).
- Область проведения процедур (синий).

## Гарантия

Компания M.D.S. PHARM L.T.D предоставляет гарантию на аппарат «Стим-соник» в течение одного года. Это относится только к устройству, используемому в домашних условиях, не пострадавшему в аварии, не модифицированному и не отремонтированному лицом, не уполномоченным компанией.

При возникновении неисправности, пожалуйста, проверьте, что устройство работает в соответствии с инструкциями. Если это так, верните неисправное устройство, приложив квитанцию о покупке.

На батареи и электроды гарантия не предоставляется.

Для того, чтобы задействовать гарантию в случае неисправности прибора, необходимо вернуть его по адресу:

עבור מ.ד.ס. פארם, ת.ד. 411 מיקוד 4610302, הרצליה פיתוח