

Новое революционное устройство, предназначенное для лечения аллергического ринита (поллиноза). Фототерапевтическое медицинское устройство **Bionette** дает облегчение и эффективно предотвращает симптомы, связанные с аллергическим насморком, такими как зуд в глотке, глазах, ушах, интраназальный зуд, ринорея, слезы, чихание, головная боль и слезотечение. The underlined sentence should be replaced with this one: Лечение не является ни химическим, ни фармакологическим и не имеет известных побочных эффектов. Оно основано на принципе фототерапии (лечение с применением световой энергии). Фототерапевтическое медицинское устройство **Bionette** использует технологию низкоуровневого узкополосного света.

СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

1. Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette
2. Батарея литиевая (CR2032, 3 В) – 2 шт.
3. Инструкция по применению
4. Пластиковый контейнер

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette предназначено для индивидуального применения в домашних условиях без контроля врача

Каждый сеанс лечения длится приблизительно 4,5 минуты, в зависимости от погрешности таймера на каждом конкретном устройстве. Рекомендуемая частота применения – два-три раза в день. Чтобы достичь максимального эффекта и наибольшей степени облегчения следует начать применение фототерапевтического медицинского устройства BioNette при появлении первых симптомов ринита. После улучшения состояния частоту применения BioNette можно постепенно снижать до полного исчезновения симптомов. Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette является очень компактным устройством, которое может поместиться даже в самый маленький карман.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

Пожалуйста, снимите прозрачную защитную ленту с батареи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Как использовать:

- Нажмите и удерживайте две резиновые кнопки по боковым сторонам прибора. Два выступающих зонда загорятся красным светом.

- Убедитесь в том, что свет горит непрерывно и не мигает.
- Вставьте зонды в нос, одновременно удерживая обе резиновые кнопки.
- Отпустите обе кнопки.
- Сеанс лечения будет завершен, когда красное свечение автоматически прекратится, это произойдет примерно через 4 минуты. (После того, как сеанс начался, его нельзя прекратить по ходу лечебного цикла).
- Следуйте инструкциям по очистке, подробно описанным в прилагаемом информационном листке.
- Рекомендуемая частота применения – 2-3 раза в день. Повторное применение повышает эффективность лечения.

Предостережение: Использование детьми только под присмотром родителей. Не смотрите прямо на источник красного света. Хранить в недоступных для детей месте.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Фототерапевтическое медицинское устройство **Bionette** содержит две высококачественные литиевые батареи CR2032 (3В). Снимите крышку и вставьте 2 (две) батареи в правильном положении согласно Рисунку № 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световая терапия	Узкополосный свет – 630 нм
Минимальная мощность облучения	4,0 мВт для каждой ноздри
Энергетическая доза	2,7 Джоуля
Таймер (автоматическое отключение кнопки нажатия)	4,5 минуты
Погрешность таймера	-/+ 15%
Источник электроэнергии	2 батареи CR2032 (3В)
Сила тока (макс.)	0,3 А
Срок службы батареек	До 80 применений
Показатель низкого заряда батарей	Активное мерцание светодиода
Вес	18 ± 1 г с батарей
Размер устройства	52x38x15 мм (допуски: ± 0.5 мм)
Тип установки и пользования	Ручное

Режим работы	Непрерывный
Подключение к сети	Внутреннее питание
Диаметр зондов	в верхней части – 6,76 ± 0.5 мм, в нижней – 7,88 ± 0.5 мм
Длина зондов	28.75 ± 0.5 мм
Расходимость излучения	±20%
Тип рабочей части	BF
Характеристики светодиода:	
- световой поток	2,995 лм
- цветовая температура	500 К

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ

	Эксплуатация	Транспортировка, хранение
Температура	От +15 °С до +40 °С	От –10 °С до +40 °С
Относительная влажность	От 30% до 85%	До 80%
Атмосферное давление	От 86 кПа до 106 кПа	От 86 кПа до 106 кПа

Хранить изделие следует, не подвергая воздействию коррозионного газа, в хорошо проветриваемом сухом помещении. Избегать попадания дождевой воды и нагревания солнечными лучами в процессе транспортировки.

ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Нет подтвержденных данных о взаимодействии прибора с лекарственными средствами. Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette можно использовать одновременно с приемом внутрь антигистаминных препаратов, кортикостероидов, а также препаратов для снятия заложенности.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Нет данных о появлении побочных эффектов при использовании данного устройства. Пациенты, страдающие тяжелой формой аллергического ринита, могут применять фототерапевтическое медицинское устройство BioNette более трех раз в день, не опасаясь вредного побочного воздействия.

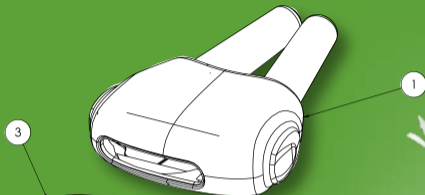


Рис. 1 Замена батареек

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отсутствуют

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВ ИЗ СЕРИИ BIOLIGHT

Линейка продуктов BIOLIGHT – одним из составляющих которой является фототерапевтическое медицинское устройство BioNette – представляет собой серию медицинских устройств, использующих технологию низкоуровневого узкополосного света для проведения неинвазивного, немедикаментозного лечения. Эта продукция была разработана командой ученых и врачей, специализирующихся на фотобиологии и фототерапии. Использование продукции подтверждено клиническими и научными данными, полученными во многих больницах и клиниках, некоторые из которых были опубликованы в престижных медицинских изданиях по всему миру. Этот продукт является значительным прорывом в фармакологическом лечении. Его воздействие впечатляет, и при этом он не имеет известных побочных эффектов. Появление фототерапевтического медицинского устройства BioNette является революционно новым фармакологическим альтернативным способом лечения аллергических ринитов.

Продукция серии BIOLIGHT включает также BIOSTICK, BIOBEAM 660, BIOBEAM 940, и BIOBEAM ACNE.

ОЧИСТКА

- **Очистка:** Источник света следует протирать мягкой влажной тканью с очищающим раствором. Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette ни в коем случае нельзя погружать в воду.
- **Стерилизация:** Рекомендуется протирать световые источники тканью, смоченной в 70%-м растворе этилового спирта.
- **Гигиеническая защита:** рекомендуется хранить прибор в максимально возможных гигиенических условиях.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Красная лампочка не загорается	Батареи старые или разряженные	Заменить батареи
	Батареи были неправильно вставлены	Поставьте батареи правильно
Красная лампочка мигает	BioNette неисправен	Если вышеуказанные способы не решают проблему, обратитесь к вашему местному поставщику.
	Батареи разряжены	Замените батареи

МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette утилизируется согласно Европейской Директиве Утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE), согласно которой конечный пользователь должен поместить его в специальные отходы.

Также при утилизации устройства и его упаковки, требуется обеспечить обязательное выполнение всех необходимых процедур в соответствии с местными применимыми законами и нормативными положениями.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ СРОКОМ

Гарантия предоставляется покупателю, приобретающему устройство, и подтверждает тот факт, что устройство не имеет дефектов материала и находится в исправном рабочем состоянии.

Гарантия действует в течение одного года с момента покупки.

Гарантия распространяется на ремонт и бесплатную замену запасных частей, которые, по мнению изготовителя, были повреждены во время эксплуатации, когда устройство использовалось в соответствии с инструкцией, выданной производителем.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

- Неправильное использование
- Ремонт, осуществляемый не производителем и не официально назначенным им представителем
- Случайное повреждение или поломка
- Повреждение вследствие использования неподходящих батарей



MEDES LIMITED

“МЕДЕС ЛИМИТЕД”, 5, Бомонт Гейт, Шенли Хилл, Радиетт, Хертс, WD7 7AR, Англия (5, Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett, Herts, WD7 7AR, England)
Тел/Факс + 44 19 23859810

Обозначения на упаковке

	Следует строго соблюдать все предостережения		Утилизация электрического и электронного оборудования
	Изготовитель		Во время эксплуатации следуйте инструкциям.
	Стандарт электробезопасности в соответствии с 60601-1. Тип “BF”.		Дата изготовления



СироЛайт Лтд»

15, Жирон стрит, Ехуд, 56217, Израиль
(15, Giron St, Yehud, 56217, IL) | www.biolightMD.com



Импортирует и распространяется:
www.bionette.ru

Продукт сертифицирован в соответствии с ISO 9001 (2008), MDD2007/47, EEC (2007), ISO 13485 (2003). Сертификат № 499/499CE
Технология и показания к фототерапии запатентованы.
Патентная заявка на устройство **Bionette** находится на рассмотрении.
Сделано в Израиле

сделано в Израиле, версия 420.00.05 (rev04) Дата 01-01-2015



RoHS
2002/95/EC

ВНИМАНИЕ

Не смотреть прямо на источник света.
Использование детьми только под присмотром родителей.

руководство по эксплуатации →



bionette®

Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette
Лечение аллергического ринита